



IH-500 Titration d'anticorps automatisée

BIO-RAD

IH-500 Titration d'anticorps

Plus rapide et
sans erreurs
manuelles





- Bio-Rad innove avec l'implémentation d'une fonction de **titrage d'anticorps entièrement automatisée**.
- Lancez des titrations d'un simple clic à partir du système **IH-500** doté du réactif **ID-Titration Solution**, la solution pour titration conçue spécifiquement pour les cartes-ID*.
- **Élimine les erreurs potentielles** des techniques manuelles tandis que le système **IH-500** effectue automatiquement des **doubles dilutions en série**.
- Selon vos besoin, **IH-500** effectue des dilutions allant de 1:1 à 1:32, de 1:1 à 1:2048 et de 1:64 à 1:2048.
- Élargissez vos possibilités de titration sur les trois cartes-ID à votre disposition : **LISS Coombs**, **Coombs Anti-IgG** ou **NaCl**.




* ID-Titration Solution peut parfaitement être utilisée en méthode manuelle et est intégrée à **IH-Com**.

Profitez d'une titration automatisée et exhaustive sur le système **IH-500**.

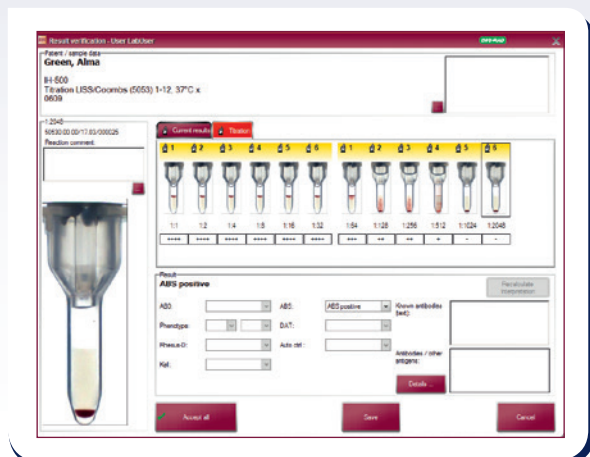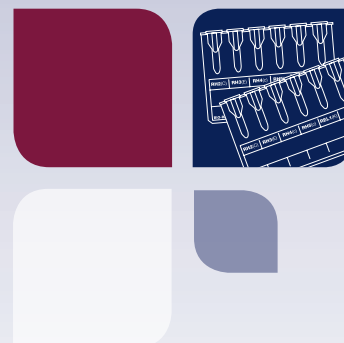

Intégration harmonieuse dans votre laboratoire

- Automatiquement adaptée à votre pratique en laboratoire, la procédure de titration sur le système **IH-500** vous permet d'utiliser les réactifs Bio-Rad ainsi que vos propres hématies.
- **Entièrement intégré à IH-Com**, le résultat de la titration est ajouté au profil du patient vous permettant de **meilleurs soins** et des **délais plus rapides** dans un système de haute fiabilité.

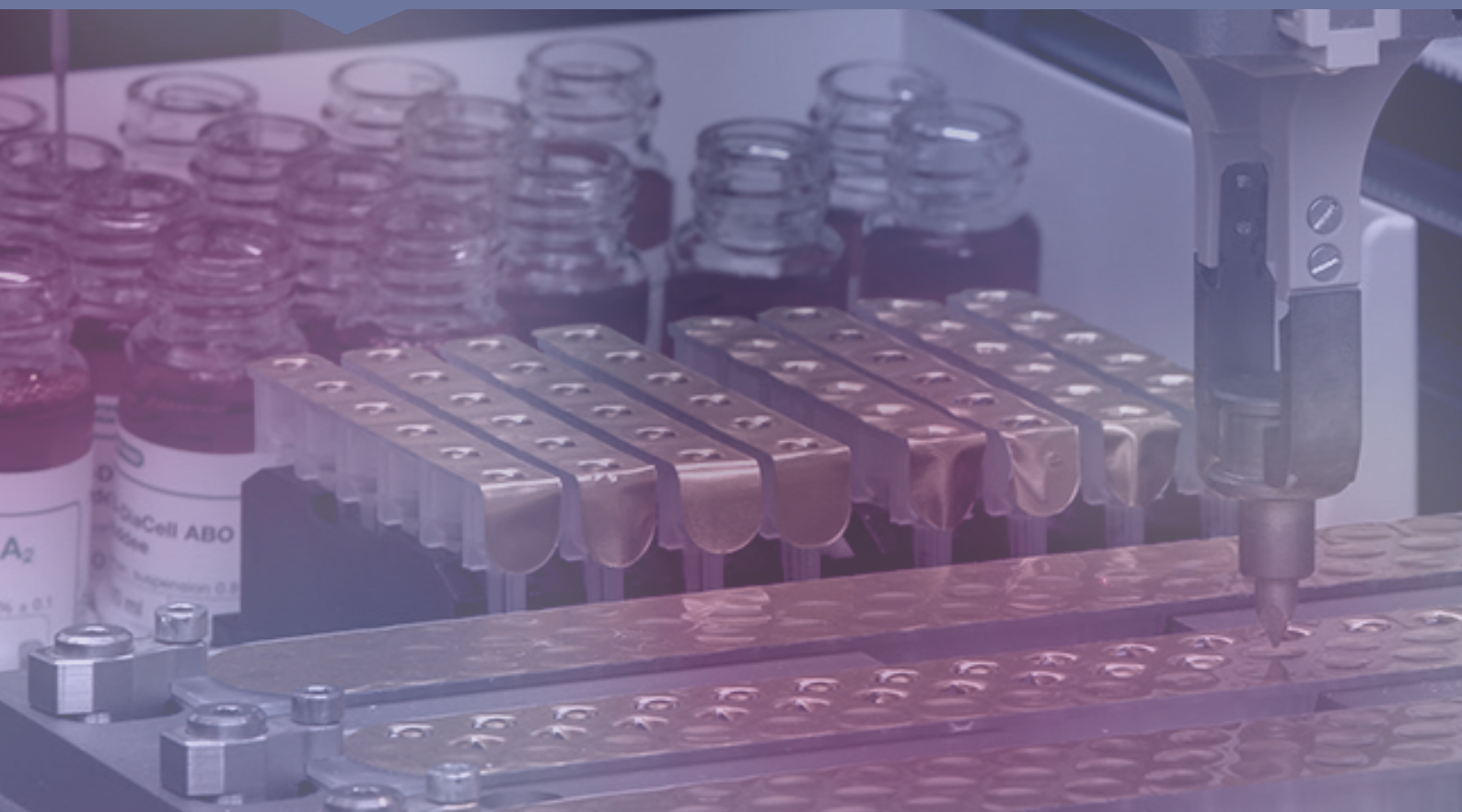

Fonctions principales

- **Titration automatisée d'anticorps avec doubles dilutions allant de :**
 - 1:1 à 1:32
 - 1:64 à 1:2048
 - 1:1 à 1:2048
- **Utilisez les cellules-ID pour la titration sur l'IH-500 selon la conclusion/résultat de l'identification d'anticorps**
- **Utilisez la carte-ID dont vous avez besoin :**
 - LISS/Coombs (Id-n°: 50531)
 - Coombs Anti-IgG (Id-n°: 50540)
 - Test NaCl, d'enzyme et agglutinines froides (Id-n°: 50520)
- **ID-Titration Solution: une solution de titration conçue pour une parfaite utilisation avec la gamme de produits ID-System**
- **Entièrement intégré à IH-Com**

Pour commander

Référence	Désignation
001500	IH-500 , automate complet pour cartes-ID
009000	IH-Com Kit Fullversion , logiciel de gestion des données
009360	ID-Titration Solution (Id-n°: 05780), 10 x 10 ml
009390	ID-Titration Racks (Id-n°: 05770), 10 racks de 60 puits

Pour plus d'information : www.bio-rad.com/immunohematology



Bio-Rad est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc. dans certaines juridictions.
IH-500 et IH-Com sont des marques déposées de Bio-Rad Europe, GmbH dans certaines juridictions.

Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation du système et sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation du réactif.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant local Bio-Rad ou visiter notre site : www.bio-rad.com/diagnostics

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories**

*Clinical
Diagnostics Group*

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** +61(2)9914-2800 **Austria** +43-1-877-8901 **Belgium** +32(3)710-53-00 **Brazil** +55(31)3689-6600
Canada +1 514 334-4372 **China** +86-21-61698500 **Czech Republic** +420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** +358-9-804-22-00
France +33 1 47 95 60 00 **Germany** +49(0)89-318-840 **Greece** +30-210-7774396 **Hong Kong** +852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100
India +1-800-180-1224 **Israel** +972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** +81-3-6361-7070 **Korea** +82-2-3473-4460 **Mexico** +52(55)5488-7670
The Netherlands +31-318-540666 **New Zealand** +64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** +48-22-3319999 **Portugal** +351-21-472-7700
Russia +7-495-721-14-04 **Singapore** +65-6415-3170 **South Africa** +27-11-442-85-08 **Spain** +34-91-590-5200 **Sweden** +46-8-555-127-00
Switzerland +41 26 674 55 05/06 **Taiwan** +886-2-2578-7189 **Thailand** +662-651-8311 **United Kingdom** +44(0)20-8328-2000