



Erytype™ • Erytype™ S

Der Standardtest in der Blutgruppenbestimmung

Komplettlösung für die sichere Transfusion





Erytype™

Kompaktplatte zur manuellen und automatischen Probenprozessierung

Gebrauchsfertige Mikrotestplatten zur Blutgruppenbestimmung mit angetrockneten monoklonalen Antisera

- **Reduzierte Einarbeitungs- und Gewöhnungszeiten** durch eine auf Agglutination basierende etablierte Technologie
- **Verkürzte Testdurchführung** durch sofort einsatzbereite Mikrotestplatten mit angetrockneten Reagenzien
- Eindeutige, starke Reaktionen durch monoklonale, qualitativ hochwertige Reagenzien **erleichtern die Ergebnisauswertung**
- Umweltbewusstes Testsystem reduziert infektiösen Abfall, dadurch **deutliche Kostensenkung**
- Verschiedene Konfigurationen für die ABO-, Rhesusfaktor D-, Rhesusformel-, Kell- und C^w-Bestimmung **gewährleisten größtmögliche Flexibilität**
- Jeweils 2 unterschiedliche Klone für Rhesusfaktor D-, C-, c-, C^w-, E-, e- und Kell-Antigenbestimmung **ermöglichen die Doppelbestimmung**
- **Besonders wirtschaftlich** durch die Bearbeitung von kleinen und großen Probenreihen mit der Kompaktplatte
- Vergrößernder Ablesespiegel und photometrische Interpretation sichern die **optimale Auswertung**
- Manuelle und automatische Probenverteilung **garantiert einfache und zeitsparende Testdurchführung**
- Volle Ausnutzung bereits im Gebrauch befindlicher Kompaktplatten ergibt ein **optimales Preis-Leistungs-Verhältnis**

Kompaktplatte zur manuellen und automatischen Probenverteilung

Bestellinformation

Katalog Nr.	Beschreibung
	Erytype™ Kompaktplatten
806 010	Erytype™ ABO+D, ABO- und Rh-Bestimmung (2 monoklonale Anti-D Reagenzien) mit Serumgegenprobe [Anti-A/-B/-AB/-D ₁ /-D ₂ /-CDE/Negativkontrolle/Blank/A ₁ /A ₂ /B/O]*10 Platten (1 Mikrotestplatte = 8 Bestimmungen)
806 020	Erytype™ ABO-16, ABO- und Rh-Bestimmung [Anti-A/-B/-AB/-D/-CDE/Negativkontrolle/Anti-A/-B/-AB/-D/-CDE/Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrotestplatte = 16 Bestimmungen)
806 030	Erytype™ ABO-32, ABO- und D-Bestätigung [Anti-A/-B/-D/-A/-B/-D/-A/-B/-D/-A/-B/-D]*10 Platten (1 Mikrotestplatte = 32 Bestimmungen)
806 055	Erytype™ Rh+K 8-double, Rh-Formel- und Kell-Bestimmung (Doppelbestimmung) [Anti-C ₁ /-c ₁ /-E ₁ /-e ₁ /-K ₁ /Negativkontrolle/Anti-C ₂ /-c ₂ /-E ₂ /-e ₂ /-K ₂ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrotestplatte = 8 Bestimmungen)
806 057	Erytype™ Rh+K 16-single, Rh-Formel- und Kell-Bestimmung (Einzelbestimmung) [Anti-C ₁ /-c ₁ /-E ₁ /-e ₁ /-K ₁ /Negativkontrolle/Anti-C ₂ /-c ₂ /-E ₂ /-e ₂ /-K ₂ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrotestplatte = 16 Bestimmungen)
806 060	Erytype™ Rh, ABO-, Rh-Formel- und Kell-Bestimmung [Anti-A/-B/-AB/Blank/Anti-C ₁ /-c ₁ /-D ₁ /-E ₁ /-e ₁ /-C ^w /-K ^w /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrotestplatte = 8 Bestimmungen)

* Anordnung der vorgetropften Reagenzien

Katalog Nr.	Beschreibung
Testerythrozyten	
816 006	Erytypecell -A ₁ , -A ₂ , -B, -O, für die Serumgegenprobe mit Erytype™ und Erytype™ S 4 x 10 ml
816 041	Erytypecell -A ₁ , für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml
816 042	Erytypecell -A ₂ , für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml
816 043	Erytypecell -B, für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml
816 044	Erytypecell -O, für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml

Zusatzreagenzien

806 220	Bromelin Erytype™ ready for use, zur Enzymbehandlung von Erythrozyten bei der Blutgruppenbestimmung mit Erytype™ und Erytype™ S10 x 50 ml
---------	---

Geräte

- Pipetten 50 µl
- Rüttler für Mikrottestplatten
- Ablesespiegel

Erytype™ S

Streifenplatte zur vollautomatischen Probenprozessierung mit TANGO™ optimo oder TANGO infinity™

Gebrauchsfertige Mikrottestplatten zur Blutgruppenbestimmung mit angetrockneten monoklonalen Antisera

- **Reduzierte Einarbeitungs- und Gewöhnungszeiten** durch eine auf Agglutination basierende etablierte Technologie
- Sofort einsatzbereite Mikrottestplatten mit angetrockneten Reagenzien **verkürzen die Rüstzeit des Tango™ optimo und des Tango infinity™**
- Eindeutige, starke Reaktionen durch monoklonale, qualitativ hochwertige Reagenzien **erleichtern die Ergebnisvalidierung**
- Streifenplattenformat reduziert infektiösen Abfall, dadurch **umweltbewusst und kostensparend**
- Unterschiedliche Erytype S-Konfigurationen für die ABO-, Rhesusfaktor D-, Rhesusformel-, Kell- und C^w-Bestimmung ermöglichen **vielfältige Testprofile**
- Jeweils 2 unterschiedliche Klone für Rhesusfaktor D-, C-, c-, C^w-, E-, e- und Kell-Antigenbestimmung **ermöglichen die Doppelbestimmung**
- **Optimierte Mikrottestplatten-Ausnutzung** durch die Bearbeitung von Einzelstreifen bei kleiner Probenzahl
- Farbverbindliche Digitalbilder und automatische Dokumentation der Einzelergebnisse ergeben eine **optimale Auswertung der Resultate**
- Durch Barcodierung von Rahmen und Einzelstreifen ist eine **höchstmögliche Sicherheit gewährleistet**

Streifenplatte zur vollautomatischen Probenbearbeitung mit TANGO™ optimo oder TANGO infinity™

Bestellinformation

Katalog Nr.	Beschreibung
Erytype™ S Streifenplatte	
806 105	Erytype™ S ABO+D, ABO- und Rh(D)-Bestimmung (2 monoklonale Anti-D Reagenzien) mit Serumgegenprobe [Anti-A/-B/-D ₁ /-D ₂ /A ₁ /A ₂ /B/O]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 107	Erytype™ S ABO+D single, ABO- und Rh(D)-Bestimmung mit Serumgegenprobe [Anti-A/-B/-AB/-D/Negativkontrolle/A ₁ /B/O]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 150	Erytype™ S Rh-Pheno double, Rh-Formel-Bestimmung (Doppelbestimmung) [Anti-C ₁ /-c ₁ /-E ₁ /-e ₁ /-C ₂ /-c ₂ /-E ₂ /-e ₂]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 155	Erytype™ S CDE+K, Rh- und Kell-Bestimmung [Anti-CDE/-K ₁ /-K ₂ /Negativkontrolle/Anti-CDE/-K ₁ /-K ₂ /Negativkontrolle]* 10 Platten (1 Mikrottestplatte = 24 Bestimmungen)

Erytype™ • Erytype™ S, der Standardtest in der Blutgruppenbestimmung

Bestellinformation

Katalog Nr.	Beschreibung
806 115	Erytype™ S ABO, ABO-Bestimmung mit Serumgegenprobe [Anti-A/-B/-AB/Negativkontrolle/A ₁ /A ₂ /B/O]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 165	Erytype™ S Rh(D), Rh(D)- und CDE-Bestimmung (2 monoklonale Anti-D Reagenzien) [Anti-D ₁ /-D ₂ /-CDE/Negativkontrolle/Anti-D ₁ /-D ₂ /-CDE/Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 24 Bestimmungen)
806 181	Erytype™ S Rh+K, Rh-Formel und Kell-Bestimmung [Anti-D/-C/-c/-E/-e/-K ₁ /-K ₂ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 170	Erytype™ S Rh+K single, Rh-Formel- und Kell-Bestimmung mit 2 monoklonalen Anti-D Reagenzien [Anti-D ₁ /-D ₂ /-C/-c/-E/-e/-C ^o /-K ^o]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 180	Erytype™ S Rh+K reagent I, Rh-Formel und Kell-Bestimmung [Anti-D ₁ /-C ₁ /-c ₁ /-E ₁ /-e ₁ /-C ^o ₁ /-K ₁ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 186	Erytype™ S Rh+K reagent II, Rh-Formel und Kell-Bestimmung [Blank/Anti-C ₂ /-E ₂ /-e ₂ /-C ^o ₂ /-K ₂ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 110	Erytype™ S ABD Confirmation, ABO- und Rh(D)-Bestätigung [Anti-A ₁ /-B ₁ /-D ₁ /Negativkontrolle/Anti-A ₁ /-B ₁ /-D ₁ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 24 Bestimmungen)
806 112	Erytype™ S ABD Confirmation II, ABO- und Rh(D)-Bestätigung [Anti-A ₂ /-B ₂ /-D ₂ /Negativkontrolle/Anti-A ₂ /-B ₂ /-D ₂ /Negativkontrolle]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 24 Bestimmungen)
806 125	Erytype™ S ABD+Rev. A ₁ , B, O, ABO- und Rh(D)-Bestimmung [Anti-A/-B/-D ₁ /-D ₂ /Negativkontrolle/A ₁ /B/O]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)
806 127	Erytype™ S ABD+Rev. A ₁ , B, ABO- und Rh-Faktor (D)-Bestimmung [Anti-A/-B/-AB/-D ₁ /-D ₂ /Negativkontrolle/A ₁ /B]*10 Platten (1 Mikrottestplatte = 12 Bestimmungen)

* Anordnung der vorgetropften Reagenzien

Testerythrozyten

816 006	Erytypecell -A ₁ , -A ₂ , -B, -O, für die Serumgegenprobe mit Erytype™ und Erytype™ S 4 x 10 ml
816 041	Erytypecell -A ₁ , für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml
816 042	Erytypecell -A ₂ , für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml
816 043	Erytypecell -B, für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml
816 044	Erytypecell -O, für die Serumgegenprobe auf Erytype™ und Erytype™ S10 ml

Zusatzreagenzien

806 220	Bromelin Erytype™ ready for use, zur Enzymbehandlung von Erythrozyten bei der Blutgruppenbestimmung mit Erytype™ und Erytype™ S10 x 50 ml
---------	---

Geräte

TANGO™ **optimo** oder TANGO **infinity**™



**Bio-Rad
Laboratories**

Bio-Rad Laboratories ist ein multinationaler Hersteller und Händler für klinische Diagnostik und Life Science Produkte.

Clinical
Diagnostics Group

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
Industriestrasse 1
63303 Dreieich, Germany
www.bio-rad.com/immunohematology



10-31-1299 Printed in France with soy-based inks on paper from sustainably managed forests

© Bio-Rad 898806010 09/2013