


Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3440021-00
	2024-12-02

186485 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr					Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**				Test Results Ergebnisse						
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	JK ^a	JK ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b									
1	105041	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	o	+	+	+	nt	nt	nt	nt	1			
2	104232	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	nt	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	nt	nt	nt	nt	2							
3	100690	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	o	o	o	+	+	+	+	+	o	o	nt	3							

Autocontrol																																							Autocontrol									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pos. Reaction with Pos. Reaktion mit
Possible Antibodies Mögliche Antikörper

1	2	3
C, C ^w , Le ^b	E, Lu ^a , Le ^a	K, Js ^b , S, Co ^a

1 + 2	1 + 3	2 + 3
D, Fy ^a , JK ^b , N, s	e	c, Fy ^b , Jk ^a , M, Xg ^a

1 + 2 + 3
k, Kp ^b , Lu ^b , P ₁


Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

+= positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark

** Donors are tested negative for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. / Die Spender wurden negativ auf HLA class I mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet.



Biotestcell-P3

REF	816017
LOT	3440021-00
	2024-12-02

