


# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

<b>REF</b>	816020
<b>LOT</b>	3416011-00
	2024-06-17

186486 / 06

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

			Rh-hr					Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse										
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	Jk <sup>a</sup>	Jk <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>											
1	305606	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	o	+	+	o	o	nt	nt					1					
2	304320	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	o	+ <sup>s</sup>	+	+	o	o	nt	nt					2				
3	104620	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	+	o	+	o	+	+	+	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt					3						
4	305187	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	o	+ <sup>w</sup>	+	+	+	o	nt	nt					4				
5	305965	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	+	o	o	nt	nt					5					
6	600027	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	o	nt	nt					6					
7	305405	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+ <sup>w</sup>	o	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	o	o	nt	nt					7				
8	104891	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	o	+	+	o	nt	nt	nt	nt					8						
Autocontrol																																										

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

\*\* Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.


+ = positive positiv    0 = negative negativ    nt = not tested nicht getestet    w = weak schwach    s = strong stark

**Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**  
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany  
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724  
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3416011-00
	2024-06-17

