


# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

<b>REF</b>	816020
<b>LOT</b>	3428011-00
	2024-09-09

186486 / 06

Last Name Nachname	First Name Vorname	Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe	Identified Antibodies Identifizierte Antikörper	ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt		Date Datum	Signature Unterschrift

	Donor- No.	Rh- Typ	Rh-hr							Kell					Duffy		Luth- eran		Kidd				MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse									
			D	C	E	c	e	C <sup>w</sup>	K	k	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	Jk <sup>a</sup>	Jk <sup>b</sup>	M	N	S	s	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	P <sub>1</sub>	Xg <sup>a</sup>	Co <sup>a</sup>	Co <sup>b</sup>	Di <sup>a</sup>	Di <sup>b</sup>													
1	305606	R <sub>1</sub> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	o	+	+	o	o	nt	1													
2	304320	R <sub>2</sub> R <sub>2</sub>	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2										
3	100445	R <sub>1</sub> <sup>w</sup> R <sub>1</sub>	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3										
4	904465	R <sub>0</sub> r	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	nt	nt	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	nt	nt	HLA+**	4										
5	305965	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5										
6	600027	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6										
7	104966	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	+	+	nt	nt	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7										
8	303913	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	8										
Autocontrol																																							Autocontrol						

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.

\*\* Donors are tested for HLA Class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA Class I Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.


+= positive positiv    0= negative negativ    nt= not tested nicht getestet    w= weak schwach    s= strong stark

**Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH**  
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, Germany  
Tel.: +49-6103-3130-0, Fax: +49-6103-3130-724  
www.bio-rad.com, techsupport.bmd@bio-rad.com



# Biotestcell-I8

Antibody Identification Table /  
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816020
LOT	3428011-00
	2024-09-09

