


Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3408011-00
	2024-04-22

187500 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

		Rh-hr							Kell					Duffy		Luth-eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse								
Donor- No.	Rh- Typ	D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b										
1	305786	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	HLA+**	1					
2	904361	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		2					
3	903990	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	HLA+**	3					
4	305531	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		4					
5	904362	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	nt	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		5					
6	304151	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Yt(b+)	6					
7	902287	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		7					
8	104846	rr	o	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	nt	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		8					
9	550014	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		9					
10	550034	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	o	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10					
11	306353	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	+	+	nt	nt	+	o	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		11					
Autocontrol																																									

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.


** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark



Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3408011-00
	2024-04-22

