


Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3448011-00
	2025-01-27

187500 / 07

Last Name Nachname		First Name Vorname		Born geboren	
Bloodgroup Blutgruppe		Identified Antibodies Identifizierte Antikörper		ID	
Hospital / Physician Krankenhaus / Arzt				Date Datum	Signature Unterschrift

	Donor- No.	Rh- Typ	Rh-hr						Kell						Duffy		Luth- eran		Kidd		MNS				Lewis		P	Xg	Colton		Diego		Special Type** Besonderheiten**	Test Results Ergebnisse				
			D	C	E	c	e	C ^w	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Lu ^a	Lu ^b	Jk ^a	Jk ^b	M	N	S	s	Le ^a	Le ^b	P ₁	Xg ^a	Co ^a	Co ^b	Di ^a	Di ^b						
1	904599	R ₁ R ₁	+	+	o	o	+	o	o	+	o	+	nt	+	o	+	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	nt	nt	nt	nt		1						
2	904598	R ₂ R ₂	+	o	+	+	o	o	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt		2				
3	904597	R ₁ ^w R ₁	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	nt	+	+	o	o	+	+	o	+	+	o	+	o	+	nt	nt	nt	nt		3						
4	904596	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	+	+	o	+	nt	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	o	o	nt	nt	nt	nt		4						
5	306256	r'r	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	o	+	+	o	nt	nt		5							
6	305603	r''r	o	o	+	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	+	o	+	o	+	+	o	o	nt		6						
7	904600	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	o	+	nt	+	o	+	+	+	o	+	o	+	o	o	o	o	nt	nt	nt	nt		7						
8	600302	rr	o	o	o	+	+	o	+	o	o	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	nt		8						
9	550011	R ₁ r	+	+	o	+	+	o	o	+	o	+	o	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	o	+	+	+	+	o	+	nt		9					
10	306367	R ₀ r	+	o	o	+	+	o	o	+	o	+	+	o	o	o	o	+	+	o	+	o	+	o	o	+	+	nt	nt	nt	nt		10					
11	305711	rr	o	o	o	+	+	o	o	+	+	+	o	+	+	o	o	+	+	o	+	o	+	+	o	+	+	+	o	o	nt		11					
	Autocontrol																													Autocontrol								

Shaded columns indicate antigens destroyed or diminished in reactivity by enzyme treatment. Die farbig gekennzeichneten Antigene können im Enzymtest unterdrückt oder zerstört werden.


** Donors are tested for HLA class I antigens according to Bio-Rad test method using a monoclonal anti-HLA class I reagent. Positive reactions are reported accordingly. / Die Spender wurden mit einem monoklonalen Anti-HLA class I-Reagenz in einer Testmethode von Bio-Rad getestet. Positive Reaktionen sind entsprechend ausgewiesen.

+ = positive positiv 0 = negative negativ nt = not tested nicht getestet w = weak schwach s = strong stark



Biotestcell-I11

Antibody Identification Table /
Antikörper Identifizierungstabelle

REF	816021
LOT	3448011-00
	2025-01-27

